

## BADPALL KULAN

Artikelnummer: 142570

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Innan användning försäkra att pallen sitter stadigt.
- Pallen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
- Kontrollera stödfötterna regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter ökar risken för att pallen förlorar sitt fäste vilket kan göra stolen instabil.
- Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Max brukarvikt 130 kg.

**Avsedd användning:** Badpallen Kulan är avsedd att sitta på när man duschar.

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

### Teknisk specifikation

Sitsens djup: 40 cm  
Sitsens bredd: 43 cm  
Vikt: 2,7 kg

Material: Stålrör, PE (sits), TPE (stödfötter)





### Återvinning:

Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Tillverkad av:  
**Swereco AB**  
Vagnvägen 4  
SE-364 42 Lenhovda  
Tel: +46 (0)8 5000 5240  
[www.swereco.com](http://www.swereco.com)  
[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)

## Användning:

1. Installera badpallen ovanför badkaret.
2. Kontrollera att hela stödfoten ligger mot badkarskanten. Kontaktytan måste vara minst 4 cm för varje enskild stödfot. Är kontaktytan mindre än 4 cm ökar risken för att pallen förlorar sitt fäste och blir instabil.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

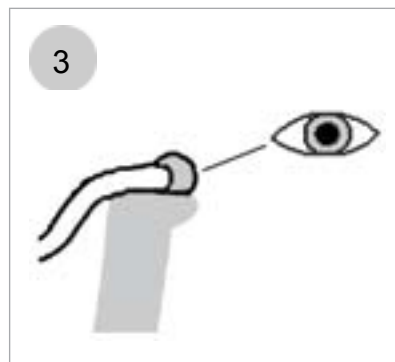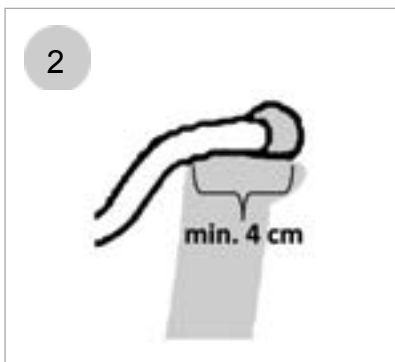

**Skötselanvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol. Sitsen är enkel att avlägsna vid rengöring.

## Reservdelar:

- Art. nr 120706, Stödfot
- Art. nr 142128, Sits



Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco