

BRUKSANVISNING

KÖRANVISNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs igenom hela denna dokumentation innan du använder din Eloflex för att vara säker på att du använder den på ett sätt som är riskfritt, och som inte skadar dig, din omgivning eller din elrullstol.

**Eloflex
H**



EL&FLEX

Tack och lycka till!

Tack för att du valt en Eloflex som ditt hjälpmedel. Det betyder mycket för oss eftersom vår vision är att göra människors vardag lite enklare och att ge människor med rörelsehinder en större frihet. Vi hoppas att du upplever båda med hjälp av din Eloflex.

Vi tror att du kommer att få mycket glädje av din nya elrullstol. Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Vi uppmanar dig att läsa igenom hela denna dokumentation innan du använder din Eloflex för första gången. Vi föreslår också att du tränar på att köra din Eloflex på en avskild, öppen och plan yta innan du använder den i andra sammanhang.

Eloflex elrullstol är konstruerad för användare med många olika behov. Beslut huruvida Eloflex är lämplig för användaren tas alltid av ordinatören eller återförsäljaren tillsammans med användaren själv. Eloflex påtar sig inget ansvar för fall där elrullstolen inte är anpassad efter brukarens behov.

En Eloflex skall i första hand användas i sitt standardutförande. Om elrullstolen måste anpassas eller förändras på något sätt får den endast utföras av din hjälpmedelscentral eller av Eloflex. Observera att skador och fel som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte följts eller på grund av dåligt underhåll omfattas ej av garantin.

Lycka till och mycket glädje med din Eloflex.

Kör försiktigt!



Innehåll	Sidan	Sidan	
Avsedd användning	3	Säkerhetsbälte	9
Fälla upp	4	Justering av svankstöd	10
Fälla ihop	5	Justera ryggstödet	10
Installera joystick-kontrollen	6	Justering av låshake	11
Fälla ner joystick	6	Transport och förvaring	11
Laddningsinstruktioner	7	Kontrollpanelen	12
Manuell köring	7	Tillval	13
Justera armstöden	8	Körningsanvisning	14-16
Fotplattan	8	Säkerhetsanvisning	17-19
Körhandtaget	9	Teknisk data	20
Tippskydd	9	Kontakt	20

Avsedd användning

Typklassificering och avsedd användning

Eloflex elrullstolar har utvecklats för personer som har svårt för att gå eller inte kan gå alls, men som har synförmåga, kroppslig förmåga och mental förmåga att styra en elrullstol.

Eloflex elrullstol är tillräckligt kompakt och smidig för inomhusbruk, men stolen är även lämplig att använda utomhus. I kapitlet "Tekniska data" längst bak i detta dokument finns uppgifter om hastighet, vändradie, räckvidd, maximal stigförmåga, maximal vikt för användaren o.s.v. Vi uppmanar dig att läsa all säkerhetsinformation i kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" i detta dokument.

Eloflex är testad och godkänd enligt EN12184:2014 - klass B (inomhus- och utomhusanvändning). Eloflex är också godkänd enligt ISO-7176, IEC60601 och batterierna är godkända enligt UN38.3.

Eloflex elrullstolar uppfyller tillämpliga krav i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt i föreskrifterna (LVFS 2003:11 och LVFS 222009:18) om medicintekniska produkter. Produkten uppfyller härigenom kraven i EG:s direktiv om medicintekniska produkter, 93/42/EEG och 22007/47/EG.

Överensstämmelsebedömning/CE-märkning enligt klass 1 har utfärdats i enlighet med det medicintekniska direktivet 93/42 EEG / MPG (medicintekniska produkter lag) och gäller endast den kompletta produkten. CE-märkningen blir ogiltig om man använder utbyteskomponenter eller tillbehör som inte har godkänts för denna produkt.

Behov

Syftet med en Eloflex elrullstol är att kompensera en skada eller ett funktionshinder, varför den rekommenderas under följande omständigheter:

- Om användaren har oförmåga att gå eller starkt begränsad förmåga att gå, vilket gör det svårt att förflytta sig i den egna bostaden.
- Om det finns behov av att lämna bostaden för att komma ut i friska luften eller för att besöka de ställen som normalt sett besöks för att vardagsärenden skall utföras.
- När användaren har svårt att ta sig till, eller utföra arbete eller aktiviteter på grund av sitt rörelsehinder.

Det är lämpligt att använda Eloflex elrullstolar både inom- och utomhus, om det på grund av rörelsehinder inte går att använda handdrivna rullstolar, men ändå är möjligt att på ett korrekt sätt handha eldrivna rullstolar.

Tillbehör

Laddare och påse med enklare verktyg finns vid leverans i förvaringsväskan under sitsen.

Användbarhet

Använd endast Eloflex elrullstol när den är i fullt funktionellt skick. Annars försätter du dig själv och andra i risk. Följande lista innehåller inte alla möjliga situationer. Den beskriver endast vissa situationer som kan påverka användbarheten för elrullstolen.

- Använd inte elrullstolen om batterierna är defekta eller deformerade
- Använd inte elrullstolen om motorn går ryckigt eller för onormalt ljud
- Använd inte elrullstolen om det förefaller vara fel på bromsfunktionen
- Kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare om däckerna är slitna
- Kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare om du upptäcker skada på säkerhetsbältet, armstöd, sits, ryggstöd, styrspak eller annan del av stolen
- Kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare om du upptäcker skada på elsystemet (kablar, batterier, laddare o.s.v.)

Garanti

Du har alltid två års garanti på din elrullstol från Eloflex. Garantivillkoren är i linje med de gällande nationella och generella affärsvillkoren och lagarna. De detaljerade garantivillkoren kan laddas ned på www.eloflex.se. Observera att du bör spara originalkartongen till din Eloflex under garantitiden (kartongen går att fälla ihop och ställa undan).

Livslängd

Den kalkylerade livslängden på en Eloflex är 5 år. Produktens livslängd påverkas dock i stor utsträckning av hur den används och sköts. En Eloflex kan ha en betydligt längre livslängd om man är rädd om den och bara använder den i linje med informationen i detta dokument.

Säkerhetsföreskrifter och risker

LÄS IGENOM KÖRANMISNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, FRÅN SIDAN 10, NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN ELOFLEX ELRULLSTOL.



Fälla upp

1. Ställ den hopfällda stolen upprätt och fäll ut fotplattan. Bild 1.
2. Ta tag i handtaget bak på ryggstödet och dra bakåt. Håll samtidigt emot med en hand på sittdynan. Bild 2.
3. Stäng låshaken. Bild 3.
4. Fäll ut tippskydden genom att trycka på knappen och sedan sväng ut tippskyddet. Bild 4.
5. Höj armstöden till önskad höjd. Bild 5.




VIKTIGT!

Det är mycket viktigt att du stänger låshaken och fäller ut tippskydden innan stolen tas i bruk.

3



4

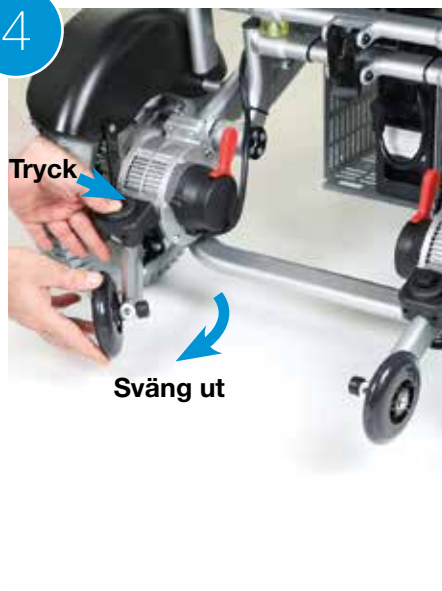

5



Fälla ihop

Fäll ihop


1. Sänk ner armstöden. Bild 1.

2. Fäll in tippskydden genom att trycka på knappen och sedan svänga dem inåt. Bild 2.

3. Öppna låshaken. Bild 3.

4. Ta tag i handtaget bak på ryggstödet och tryck framåt. Håll samtidigt emot med en hand på sittydynan. Bild 4.

5. Fäll in fotplattan. Bild 5.

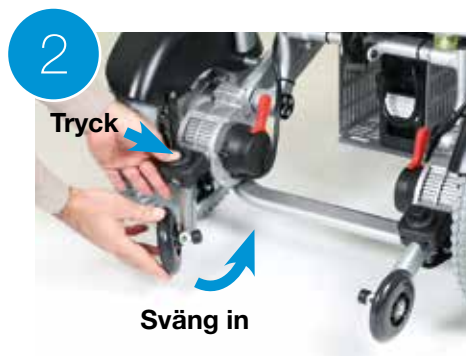

Läs mer...
... om hur man justerar
armstöden på sidan 8.



Installera joystick-kontrollen


Steg 1

Montera joysticken i fästet under armstödet och dra åt skruven.



Steg 2

Sätt ihop kabelkontaktarna och vrid försiktigt tills stiften går in i hålen och spåren i de två kontaktarna går i varandra. Skruva sedan ihop hylsorna på respektive kontakt med varandra.

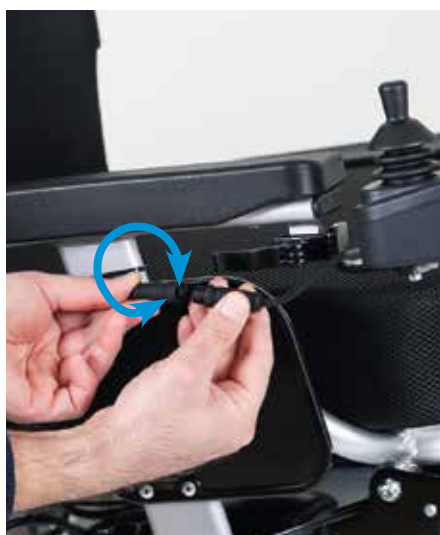

Läs mer!

Om du vill flytta joysticken till vänster armstöd finner du instruktioner på www.eloflex.se/instruktioner

Fäll ner joystick

Det smarta joystickfästet tillåter användaren att snabbt fälla ner joysticken utan att ta bort den. Detta innebär att man kommer närmare bordskanten vilket ger en bättre sittställning när man skall äta.

1. Lyft låsspaken för att lossa joysticken.
2. Dra i joysticken försiktigt framåt. Låt sedan joysticken hänga rakt ner.



Laddningsinstruktion

Så här laddar du

Börja med att stänga av din Eloflex (alla lampor på joysticken skall vara släckta). Koppla in laddaren i uttaget på joystickens framsida. Var noga med att kontakternas position stämmer överens med varandra. Sätt därefter in laddarens elkabel i ett vägguttag.

Laddning indikeras med en lampa på laddaren. Röd lampa betyder att laddning pågår. Efter cirka fem timmar är batterierna laddade till 90 procent. Stolen kan nu användas igen.

Efter cirka åtta timmar blir lampan på laddaren grön och batterierna är fullt laddade. Under laddningen blir själva laddaren varm, och detta är helt normalt.

För maximal livslängd på batterierna bör laddning ske i cirka fem timmar när stapeln på batteriindikatorn vid joysticken gått ner till en tredjedel (när tre av lamporna lyser grönt). Batterierna tar inte skada av att underhållsladdas men för maximal livslängd rekommenderar vi att du kopplar ur laddaren när batterierna är fulladdade.



Laddning av batterierna kan ske ner till -10 grader. Vid laddning i lägre temperaturer blir batterierna inte fulladdade. Om din Eloflex används i minusgrader påverkas körsträckan. Vid exempelvis -10 grader kan körsträckan minska med upp till 50%.

Mer info om batterier och laddning finns på www.eloflex.se/batteri



VIKTIGT!

**Koppla ALDRIG
in laddaren direkt
i batteriet.**

Manuell körning

Stäng av elrullstolen med joysticken. Tryck sedan fram de röda spakarna på motorerna (se bild) för att koppla ifrån de magnetiska bromsarna. I detta läge kan stolen rullas manuellt.

Observera! Om användaren använder stolen utan hjälp av assistans måste stolens magnetiska lås alltid vara påkopplade.




Justera armstöden

För optimal sittkomfort kan man justera höjden på armstöden.

Gör så här:

1. Lossa först låset genom att lyfta i låsspaken.
2. Höj eller sänk sedan armstöden till önskad höjd.
3. Fäll ner låsspaken.

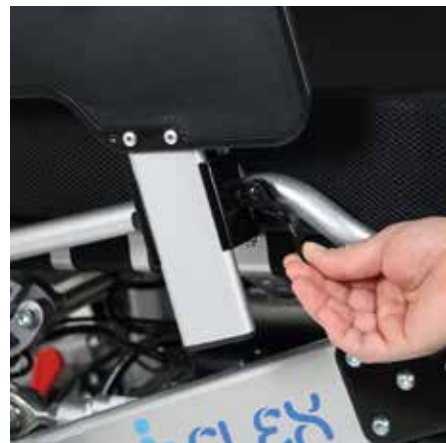

TIPS!

Det går även att ta bort armstöden helt för enklare i och urstigning.

Fotplattan

För enklare i och urstigning kan fotplattan fällas upp enligt bilderna nedan.



Körhandtaget

Körhandtaget används för att rulla stolen manuellt. Körhandtaget kan fällas upp när det inte används.



Tippskydd

Du kan fälla in tippskydden vid hopfällning av stolen och vid transport.

1. Tryck på knappen
2. Fäll in tippskyddet.

OBS! Tippskydden måste alltid vara utfällda när du använder stolen.



Säkerhetsbälte

För säker köring rekommenderar vi att man alltid använder säkerhetsbältet när stolen körs.



Justering av svankstöd

Modell H är utrustad med ett praktiskt svankstöd för optimal sittkomfort. För att justera svankstödet gör du så här.

- 1.** Lyft rygglädseln på framsidan.
- 2.** Lossa eller spänn svankstödet med hjälp av kardborrefästet till önskat stöd.
- 3.** Om du inte vill ha något svankstöd tar du bort hela svankstödet.



Justera ryggstödet

Fäll upp bakstycket av ryggen genom att dra i det. Spänn alternativt lätta på kardborrebanden för en bekväm sittställning. Fäll sedan ner ryggstycket och tryck till lätt så att det fastnar i kardborrebanden.



Justering av låshake

Det är viktigt att låshaken på din Eloflex går trögt att dra upp och ner. Den skall gå så trögt att den kan stå rakt ut av sig själv. Detta är viktigt för att låshaken skall stanna i sin låsta position även om fjäderna trycks ihop.

För att göra låshaken trögare behöver du bara dra åt fästet med de två insexskruvorna som håller låshaken på plats.



Det är viktigt att låshaken går trögt att dra upp och ner så att den inte öppnar sig när man använder stolen.



Transport och förvaring

- En hopfäld stol kan läggas i bagaget på en bil eller ställas in i en garderob.
- Om stolen inte skall användas på ett tag rekommenderar vi att batterierna fulladdas innan stolen ställs undan.
- Stolen bör förvaras inomhus i frostfria, torra och ventilerade utrymmen. Förvaringstemperatur 0-30 grader.



- Vid transport i färdtjänst- eller handikappbuss skall Eloflex fästas i de fästpunkter som bilderna till höger visar. Observera att Eloflex inte är testad som bilsäte. Vi rekommenderar därför alltid att användaren flyttar över i bilens egna säten.

Kontrollpanelen

Batterikontroll

Ström på och av

Minska hastigheten

Öka hastigheten

Joystick

Tuta



USB-kontakt

TIPS:

Med hjälp av USB-kontakten på joystickens undersida kan du ladda din mobiltelefon.



Joystick: kontrollerar stolens hastighet och färdriktning.



Tuta: Tryck för att påkalla uppmärksamhet.



Ström på och av: Tryck för att sätta på och stänga av din Eloflex.



Öka hastigheten: Tryck för att öka stolens maxhastighet.



Minska hastigheten: Tryck för att minska stolens maxhastighet.

1

Batterikontroll: Här indikeras hur mycket ström det finns kvar i batterierna. När batterierna är fulladdade lyser samtliga lampor. Allt eftersom batterierna töms slocknar lamporna i tur och ordning. Ladda när två tredjedelar av lamporna slocknat.

2

Hastighetsindikator: Alla streck tända = max hastighet.



Vårdarstyrning

Vårdarstyrningen är en arm och ett fäste som innebär att du kan montera joysticken på ryggstödet på din Eloflex. Med vårdarstyrningen kan den som går bakom eller bredvid köra elrullstolen med hjälp av joysticken och den som sitter i åker med. En perfekt och efterfrågad lösning för äldre användare och för vissa sjukdomstillstånd.



Nackstöd

Nackstödet gör din Eloflex mer individanpassad och användbar, även för de användare som behöver lite extra stöd för huvud och nacke. Nackstödet har stora inställningsmöjligheter och kan anpassas till varje individ och behov tack vare sin smarta infästning. Med ett nackstöd på din Eloflex får du en bekväm sitt- och körställning.

Tillbehören kan beställas via din återförsäljare eller direkt hos oss.
För mer information och monteringsinstruktioner besök www.eloflex.se/tillbehor

Säkerhetsanvisningar vid körning

Det finns risk för personskador genom att rullstolen välter.

- Kör endast i stigningar och lutningar som inte överstiger den maximalt tillåtna lutningen
- Använd alltid tippskydd när du färdas med Eloflex
- Körning i nedförsbackar bör alltid ske med lägre hastighet
- Undvik sträckor, där det finns risk för halka eller slirigt underlag
- Försök aldrig att köra uppför eller nedför trappor med din elrullstol
- Kör aldrig över hinder högre än den rekommenderade maxhöjden
- Undvik snabba eller ryckiga rörelser med joystick-en och plötslig ändringar av körriktningen under körning

Risk för att bli stående på avsides platser.

- En användare med starkt reducerad rörlighet bör inte ensam köra längre sträckor utomhus

Risk för skador om en fot glider av fotstödet och hamnar under den eldrivna rullstolen under färd.

- Placera alltid fötterna i mitten av fotplattan under färd

Risk för skador om du kolliderar med andra föremål i trånga passager.

- Kör igenom trånga passager med lägsta fart och största uppmärksamhet

Risk finns att rullstolen välter om tippskydden demonteras, skadas eller monteras på en position som avviker från standardmonteringen.

- Tippskydden skall alltid vara monterade när elrullstolen används
- Tippskydden fungerar endast på fast underlag. På mjuka underlag som exempelvis gräsmattor och snö kan tippskyddet förlora sin verkan. Kör därför ytterst försiktigt på mjuka underlag




Notera att informationen markerad med dessa symboler är extra viktig. Om instruktionerna inte följs finns risk för olycka eller att din Eloflex tar skada.

Läs



Användaren måste läsa dessa säkerhets- och körinstruktioner innan elrullstolen från Eloflex tas i bruk.

Öva

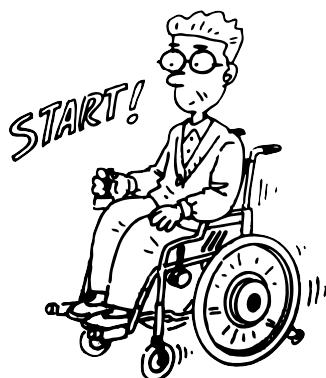


- **Övning** ger färdighet. Träna på att köra Eloflex tillsammans med en assistent genom att börja på en öppen plan yta, gärna utomhus, innan du använder din elrullstol bland andra människor, i butiker eller restauranger o.s.v.
- **Kör** framåt genom att föra joystickens sakta framåt.
- **Stanna** genom att släppa joystickens.

Backa




- **Backa** genom att föra joystickens långsamt bakåt. För att stanna släpper du joystickens. Tänk på att alltid titta bakåt innan du börjar backa för att vara säker på att ingen person eller sak är i vägen.

Snurra

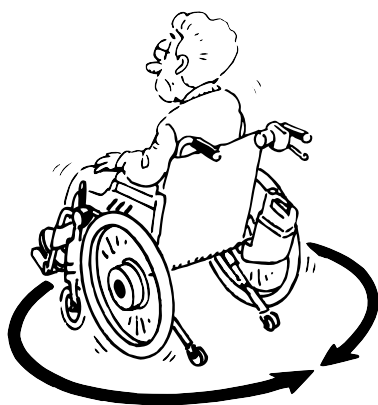


- **Snurra** genom att föra joystickens försiktigt i sidled. Ha uppsikt så att inget är i vägen på sidorna när du snurrar.

Sväng

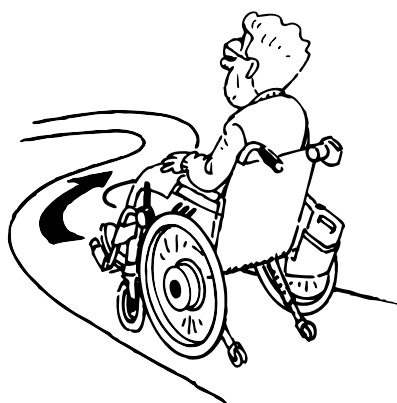


- **Sväng** när du kör genom att försiktigt föra joystickens i sidled åt samma håll som du vill svänga. Sänk alltid hastigheten när du svänger.

Hinder

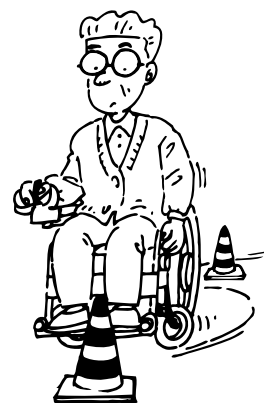

- **Öva** på att undvika och passera hinder. För joystickens i sidled samtidigt som du kör framåt för att undvika hinder. Tänk på att sänka hastigheten när du närmar dig hinder.

Snabb körning

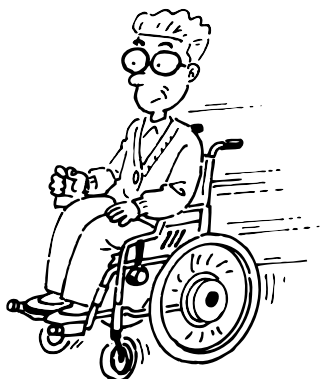

• Snabb körning

Tryck joysticken i främsta läget om du vill köra snabbt.

Tänk på att dra tillbaka joysticken och sänka hastigheten så snart du känner dig osäker, om du skall svänga eller om du närmar dig ett hinder.

Köra över hinder



• Körning över hinder

Kör sakta fram till hindret och se till att framhjulen står i färdriktningen. För därefter joysticken sakta framåt samtidigt som du lutar dig bakåt för att köra över hindret.

Eloflex H är testad och godkänd för hinder upp till max 9 cm.


Köra i lutning



• Körning på lutande underlag

Försök köra rakt upp eller rakt ner för ett lutande underlag. Luta dig något framåt när du kör uppför, och bakåt när du kör nerför, för att bibehålla tyngdpunkten. Undvik att köra i sidled om möjligt och kompensera eventuell sidlutning genom att luta dig åt motsatt håll. Kör alltid sakta på lutande underlag. Undvik underlag som lutar mer än 12 grader.

Åka hiss

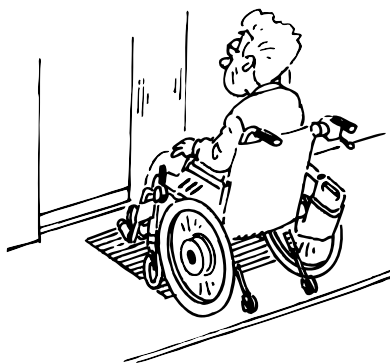


• Att använda hiss

Tänk på att kontrollera bredden på hissdörren samt hur snabbt dörren stängs innan du kör in i hissen.

Tänk på att du kanske måste backa ut från hissen om den inte är tillräckligt stor för att du skall kunna vända.


Köra på väg

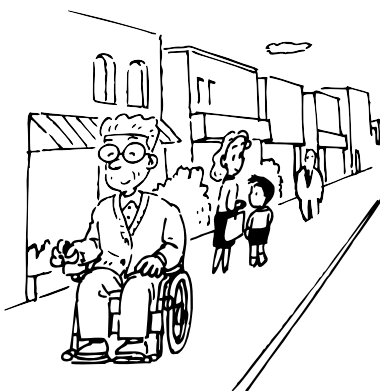

• Körning på väg

Kör i första hand på trottoarer, gångbanor och cykelvägar och i sista hand på trafikerade körbanor med din Eloflex.

Korsa körbana

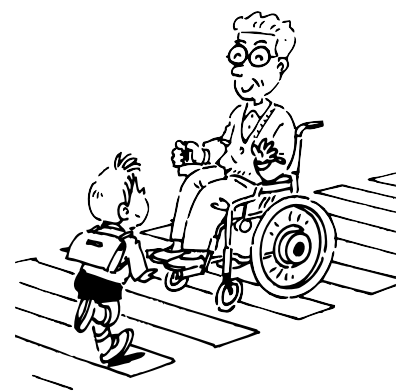

• Att korsa körbanan

Välj om möjligt alltid att korsa vägen på ett övergångsställe. Var uppmärksam på korsande bilar. Använd avfasad del av trottoaren om sådan finns.

Undvik trottoarkanter som är högre än 9 cm.

Generella säkerhetsanvisningar

Det finns risk för personskador om den elrullstolen används för andra ändamål än de som beskrivs i detta dokument.

- Använd elrullstolen endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning (se ovan, kapitel "Typklassificering och avsedd användning")

Det finns risk för personskador om elrullstolen används vid nedsatt körförmåga.

- Använd inte rullstolen när din körförmåga är nedsatt på grund av till exempel sjukdom, mediciner eller alkohol.

Det finns risk för personskador om elrullstolen ofrivilligt sätts i rörelse.

- Stäng av rullstolen före på- och avstigning eller om det finns risk att du, någon annan person, eller ett föremål skulle kunna komma i beröring med joysticken
- När motorema är frikopplade fungerar inte bromsarna. Därför får rullstolen endast skjutas på plan mark, aldrig i sluttningar. Låt aldrig rullstolen stå i eller i närheten av sluttningar med frikopplade motorer.

Det finns risk för personskador om den eldrivna rullstolen under färd stängs av med till exempel till/från-knappen eller genom att en kabel slits bort, eftersom den stannar med ett hårt ryck.

- Släpp joysticken vid bromsning i en nödsituation. Då stannar rullstolen automatiskt.

Det finns risk för personskador genom fall ur rullstolen

- Flytta dig inte framåt, böj dig inte framåt mellan knäna och luta dig inte ut över rullstolens kant, till exempel för att nå föremål.
- Använd alltid säkerhetsbälte och ställ in det på nytt före varje färd.
- Kör så nära den nya sittplatsen som möjligt vid överflyttning till en annan sits.

Det finns risk för personskador om maximalt tillåten last överskrids.

- Beakta den maximalt tillåtna lasten (se kapitel "Tekniska data" längst bak i detta dokument).
- Elrullstolen får endast användas av en enstaka person. Använd aldrig rullstolen till att transportera fler än en person i taget.

Det finns risk för personskador och skador på rullstolen om låshaken som lossas vid hopfällning inte är korrekt fastspänd när elrullstolen används.

- Om elrullstolens låshake inte har klickat på plats ordentligt kan stolen plötsligt fällas ihop när den används, vilket kan göra att du kan ramla ur rullstolen.
- Säkerställ alltid att låshaken är i en korrekt position innan elrullstolen används.

Det finns risk för personskador och klämskador vid ihop- och uppfällning av rullstolen.

- Fäll alltid ihop och upp elrullstolen så som beskrivs i bruksanvisningen.
- Var uppmärksam så att ingen eller inget kläms vid hopfällning och uppfällning.


Det finns risk för personskador och skador på rullstolen om den används i fuktiga utrymmen.

- Elrullstolen får inte användas vid duschning.
- Elrullstolen får inte användas vid badning.



Notera att informationen markerad med dessa symboler är extra viktig. Om instruktionerna inte följs finns risk för olycka eller att din Eloflex tar skada.

Korsa spårväg

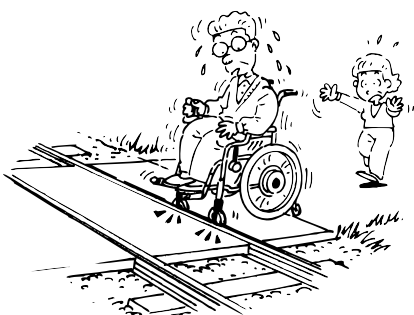


• Att korsa järnvägsspår.

Korsa alltid järnvägsspåret rakt framifrån, aldrig snett från sidan.

Korsa aldrig järnvägsspår ensam, ha alltid någon med som kan hjälpa dig.




Skarpa branter

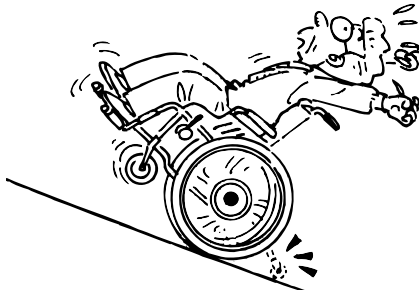

- Var försiktig om du kör i brant lutning eftersom stolen riskerar att slå över. Eloflex är testad och godkänd för lutning med max 12 grader. Ha alltid någon med som kan hjälpa dig.



Höga kanter

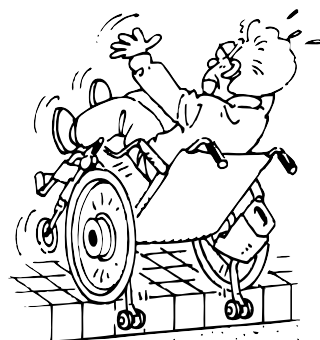

- Var försiktig när du kör upp för eller ut för en kant. Eloflex är testad och godkänd för kanter upp till max 9 cm. Ha alltid någon med som kan hjälpa dig.




Förflyttning



- Vi rekommenderar att du alltid har någon som kan hjälpa dig vid förflyttningar till och från din Eloflex. Stäng alltid av strömmen innan du påbörjar förflyttningen. Lyft alltid upp armstöden och fotstödet innan du förflyttar dig för att enklare komma i och ur stolen.



Laga inte själv

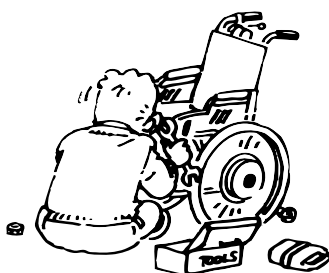

- Försök aldrig laga en trasig elrullstol på egen hand. Om du själv skruvar eller försöker laga stolen gäller ej garantin. Vänd dig alltid till Eloflex eller till den butik eller hjälpmedelscentral som sålt/förskrivit stolen. Modifiera aldrig din elrullstol på egen hand.




Ingen leksak



- Låt aldrig barn som normalt sett inte använder elrullstol att sitta i eller använda din Eloflex.



Rengöring

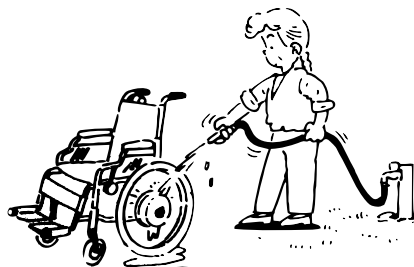

- Gör aldrig rent din Eloflex med rinnande vatten. Torka endast av den med en fuktig trasa. Om din Eloflex är trög att fälla upp och ihop kan du smörja lederna med 5-56 eller sili-kon spray.




Akta för värme



- Lämna aldrig din Eloflex i direkt solljus eller i närheten av värmekälla eftersom batterierna kan ta skada. Var aldrig nära öppen eld med din Eloflex. Du kan använda din Eloflex från -10 grader upp till +45 grader. Vid minusgrader kan räckvidden påverkas.




Förvaring

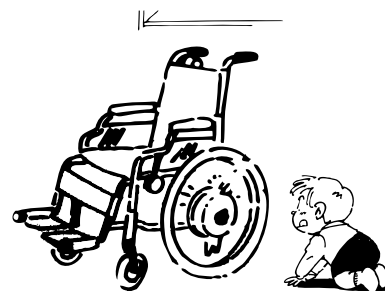

- Förvara din Eloflex utom räckhåll för barn när den inte används. Stolen bör förvaras inomhus i frostfria, torra och ventilerade utrymmen. Förvaringstemperatur 0-30 grader.



Laddaren

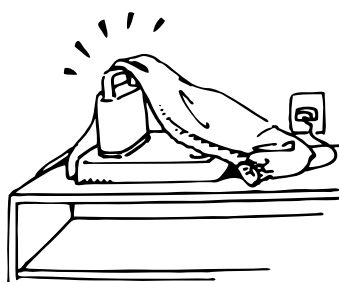

- Laddaren får aldrig täckas när den används för att ladda din Eloflex. Laddaren blir varm och det finns risk för olycka eller skada.



Batterier



- Förvara aldrig batterierna i direkt solljus men inte heller på en plats som kan uppnå minusgrader. Batterierna skall förvaras på ett torrt och ventilerat ställe.



Teknisk data

FAKTA MODELL H

VIKT¹	38 kg
HASTIGHET	8 km/h
RÄCKVIDD	40 km per laddning
KÖRTID	5 timmar per laddning
MOTOR	2 x borstlös högeffektmotor
MOTOREFFEKT	2 x 400 Watt
BATTERI	2 x Litium ION 20 AH / 24 V (480 Wh)
BATTERIVIKT	3,2 kg styck
LADDNINGSTID	5 timmar
VÄNDRADIE	99 cm
MAX LUTNING	12 grader
HJUL	9" fram (luft) / 13" bak (luft)
SITTHÖJD	54 cm
SITTBREDD	51 cm
SITTDJUP	51 cm
BRUKARVIKT	Max 200 kg
JOYSTICK	Höger, vänster eller på ryggstöd ²
DYNA	Löstagbar. Avtagbart fodral
RYGGSTÖD	Justerbar klädsel
MÅTT	103 cm (H) x 66 cm (B) x 115 cm (D)
MÅTT HOPFÄLLD	83 cm (H) x 66 cm (B) x 45 cm (D)
GARANTI	2 år

1) Totalvikt inklusive ett batteri. 2) Vårdarstyrning kräver hållare som säljs som tillbehör.
Rekommenderat lufttryck = 2,5 kg.

© Copyright Eloflex

Detta dokument innehåller upphovsrättsligt skyddad information och den får varken delvis eller helt kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt tillstånd från Eloflex.

Eloflex reserveras sig för eventuella skrivfel i detta dokument och vi förbehåller oss rätten till produktändringar.

Kontakta Eloflex

Om du har frågor eller behöver hjälp ber vi dig i första hand kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare. Om du vill ha direktkontakt med oss finner du kontaktinformation på vår hemsida, www.eloflex.se På hemsidan finns också en specifik supportsida där du bland annat hittar vanliga frågor och svar. Adressen är www.eloflex.se/faq



Eloflex
Hammarbacken 4B
191 49 Sollentuna

Telefon: 010-18 33 100
E-post: info@eloflex.se
Webb: www.eloflex.se

OBS! Kontakta alltid Eloflex för att boka tid före ett eventuellt besök.